



RUCK®
FÜR FUSS UND PFLEGE

PODOLOGSONIC



EST

Kasutusjuhend | REV 8 | Print

| REF 8011802

CE


Hea kasutaja!

Olete soetanud PODOLOG SONIC seeria toote. Uus disain – uued ideed – tõestatud tehnoloogia. Tootearenduse peamised kriteeriumid olid maksimaalne efektiivsus ja kasutajasõbralikkus: kõigil selle seeria toodetel on võimalik kontrollida kogu funktsionaalsust menüürullikuga. Kogu puhastus- ja desinfitseerimisprotseduuriks kulub kõigest 5 minutit. Tänu SweepTec tehnoloogiale

toimub vannis ühtlasem ultraheli jaotus ning seetõttu on puhastustulemus parem. Seadme korpus, ultrahelivann ning instrumentialus on tehtud roostevabast terasest. Tootele kehtib 2-aastane garantii. Kõik seeria tooted on kvalifitseeritud Klass 1 meditsiinitoodetena. PODOLOG SONIC seeria pakub maksimaalset kvaliteeti ning toode on valmistatud Saksamaal.

Täname usalduse eest, et olete valinud tööks just meie ettevõtte meditsiinitoote. Palun võtke veidi aega ning tutvuge täpsemalt alltoodud juhistega, kuidas masinat seadistada ja turvaliselt hoiustada.

Head kasutamist soovivad HELLMUT RUCK GmbH ja Foot Care Center OÜ.

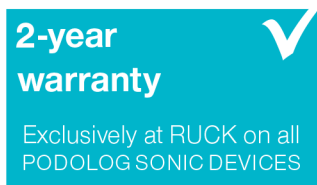

Klass 1 meditsiinitoode

Ultrahelivann	Vanniosa mõõdud (P × L × K)	Vanni maht	Ultraheli töövõimsus* / modulaarvõimsus	Netokaal	Vajalik voolutugevus	Kaitsmed
	mm	l	W/Weff	kg	A	
Podolog S	190 × 85 × 60	0,6	160/40	2,2	0,2	T1A
Podolog M	240 × 140 × 100	2,0	320/80	3,4	0,4	F2A
Podolog XL	300 × 240 × 65	2,5	560/140	5,5	0,7	F2A

*Parema efekti saavutamiseks moduleeritakse ultraheli, mille tulemuseks on 4-kordsele modulaarvõimsusele vastav võimsus


Kokkuvõttev juhisp

(Lisaks antud juhisele võite lähtuda seadme käsitlemisel ka toote põhjalikumast BANDELINI võõrkeelsest juhendist)

Menüürulliku üksuse illustratsioon



BANDELINI juhendi vastav illustratsioon

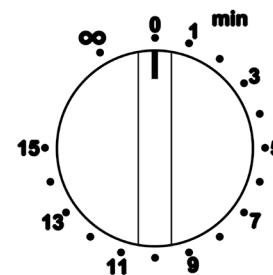

01 Puhastus

Üldiselt võiks puhastusaeg olla seatud võimalikult lühikese aja seadistusele. Olenevalt määrduvuse tasemest ning vee kogusest (informatsioon vastaval märgistusel), on puhastusperiood umbes 1 kuni 15 min.

02 Pideva protseduuri seadistus ∞ / ↻ :

- Pöörake rulli seadistusele ∞ / ↻
- Seade ei lülitu automaatselt välja. Välja lülitamiseks keerake rullik seadesse "0".

03 Lühiajaline protseduur

- Seadke rullik vastavalt soovitud puhastusperioodile.
- Taimer lülitab seadme automaatselt välja kui aeg saab läbi. Keerates rullikut tagasi, on võimalik puhastusperioodi lühendada või seadet välja lülitada.

04 Kella puudutatav informatsioon:

Väljalülitatud olekus võib seade olla ühendatud toitekorpussega. Seadet ja toitekorpusst saab omavahel lahti ühendada, vabastades ühendusest vastav juhe.



Soovitame kasutada RUCK® instrumendi desinfitseerimisvedelikku nr.: 2940101 (2L) / 2940102 (5 L) ning RUCK® instrumendi desinfitseerimisvedelik plus nr.: 2940901 (2L) / 2940902 (5L). Samuti RUCK® ultraheli puhasti nr.: 2944301. Täpsema info saamiseks pöörduge oma müügiesindaja poole.



RUCK[®]

FÜR FUSS UND PFLEGE

Ametlik esindaja:
Foot Care Center OÜ
Ahtri 6a, Tallinn 10151
+372 5644125
info@footcare.ee
www.jalakaubamaja.ee